



Vision Face-Shield Gesichtsschutz

Zweckbestimmung

Das Schild dient zur Reduktion von durch die Luft übertragenen Tröpfchen beim Sprechen, Niesen und Husten. Weiters wird ein unbewusstes Berühren des Nasen-, Mund- und Augenbereiches erschwert. Da es sich um kein zugelassenes Medizinprodukt handelt, erfolgt die Verwendung auf eigene Verantwortung. Es ist eigenverantwortlich abzuklären, ob das Schild für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist.

Informationen


- Temperaturstabil bis ca. 65 °C
- Gewicht komplett nur ca. 27g
- Die verwendeten Materialien wurden testweise mit Sterillium sowie alkoholischen Schnelldesinfektionstüchern desinfiziert. Es wurden bisher keine Materialveränderungen festgestellt. Es liegen jedoch keine Langzeiterfahrungen vor.
- Das Gummiband kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
- Es können beliebige transparente Ersatzfolien bis zu einer Materialstärke von ca. 0,3 mm eingesetzt werden.

Montage

- Zum Einsetzen des Schildes kann die Klemmvorrichtung leicht nach oben gebogen werden um, das Schild besser einfädeln zu können.



- Die Neigung des Schildes kann verstellt werden, indem die äußeren Enden weiter herausgezogen oder hineingeschoben werden.

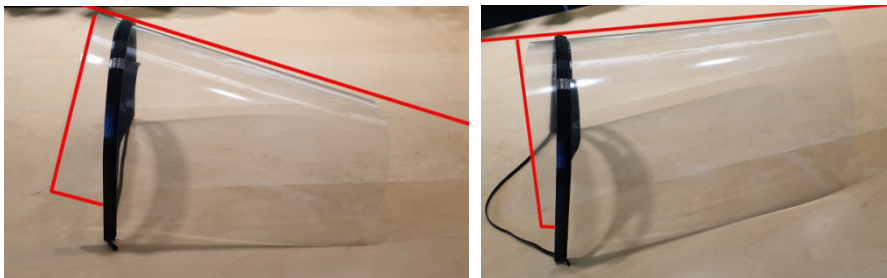

Hinweis

Ich fertige diese Face-Shields auf Anfrage um dem aktuellen Mangel an Schutzausrüstung entgegenwirken zu können. Der Preis soll im Wesentlichen meine Eigenkosten abdecken (Material und Versandkosten für Bestellungen, Druckerabnutzung, Strom, Verpackung für Versand, usw.).